

La gestion des dispositifs médicaux dans les centres de garde d'enfants

En quoi la gestion des dispositifs médicaux concerne-t-elle les centres de garde d'enfants?

De plus en plus, on utilise des dispositifs médicaux dans les centres de garde d'enfants. Or, le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables peuvent réduire le risque de transmission de maladies infectieuses.

Le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux

On entend par nettoyage l'élimination physique des débris sur les surfaces au moyen d'un détergent, de l'eau et de la friction. Quant à la désinfection, c'est un processus servant à tuer, au moyen d'une solution chimique, la plupart des micro-organismes qui causent des maladies.

Pour prévenir la propagation de ces micro-organismes, suivez les instructions précises du fabricant pour chacun des dispositifs médicaux. Si un dispositif n'a pas d'instructions du fabricant, assurez-vous de consulter l'inspecteur de la santé publique qui s'occupe de votre établissement.

À usage unique/jetable:

Terme utilisé pour désigner le matériel médical conçu par le fabricant pour ne servir qu'une seule fois. Il s'agit des dispositifs qu'on ne peut pas réutiliser et qu'il faut jeter immédiatement après les avoir utilisés. Exemples : EpiPens^{MD}, couvre-sondes de thermomètre, dispositifs de ponction capillaire (lancettes) et sondes d'alimentation.

Les dispositifs médicaux à usage unique portent habituellement le symbole du fabricant suivant :



Dispositifs médicaux réutilisables:

Il faut, après chaque usage, nettoyer et désinfecter les dispositifs réutilisables. Exemples : tubes d'espacement, seringues servant à l'administration de médicaments par voie orale, thermomètres, dispositifs de ponction capillaire (porte-lancette) et glucomètres.

*Remarque : Tous les dispositifs susmentionnés (sauf les thermomètres) doivent être réservés à l'usage d'un seul client et ne devraient pas être partagés.



Le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables

Suivez les étapes ci-dessous chaque fois.

1. Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le dispositif, et après.
2. Jeter tous les dispositifs à usage unique qui ont servi ainsi que tous les accessoires connexes. Jeter tous les objets pointus ou tranchants dans un contenant approuvé réservé à cette fin.
3. Nettoyer le dispositif réutilisable avec de l'eau et du détergent ou avec un autre produit approuvé par le fabricant. Le laisser sécher avant de le désinfecter.
4. Désinfecter le dispositif en suivant les instructions du fabricant et s'assurer de respecter la durée de contact recommandée. Certains types de tubes d'espacement nécessitent d'être nettoyés, mais pas d'être désinfectés s'ils sont réutilisés par la même personne.
5. Faire sécher le dispositif médical à l'air ou l'essuyer.
6. Entreposer le dispositif médical dans un contenant propre et fermé afin de prévenir toute contamination.

Autres suggestions:

- Lorsque vous utilisez un désinfectant liquide, suivez le mode d'emploi du fabricant.
- Songez à utiliser des lingettes désinfectantes qui peuvent servir au nettoyage et à la désinfection. Recherchez, dans le produit, un ingrédient actif comme l'ammonium quaternaire, le chlore ou le peroxyde d'hydrogène, ou utilisez des lingettes imbibées d'alcool isopropylique à 70 %. Utilisez deux lingettes : l'une pour nettoyer et l'autre pour désinfecter.
- Assurez-vous que les membres du personnel comprennent l'importance de nettoyer et de désinfecter les dispositifs médicaux sur place. Ils doivent suivre les instructions des parents, de leur superviseur ou du fabricant.
- Vérifiez les dates de péremption des produits.

Guide d'élaboration de politiques et de procédures

- Dresser l'inventaire de tous les dispositifs médicaux et des accessoires jetables.
- Inclure l'hygiène des mains.
- Consigner les coordonnées des parents.
- Fournir et suivre les instructions du fabricant concernant le nettoyage et la désinfection à l'égard de chaque dispositif médical réutilisable.
- Désigner une zone de nettoyage et de désinfection.
- Désigner une zone d'entreposage des dispositifs médicaux.

